



Varenummer 221517

Kuldepakning, Easy Ice, 18x14cm, nonwoven/PE, engangs

- ✓ Easy Ice aktiveres hurtigt ved et enkelt knæk
- ✓ Ideel til behandling af sportsskader og forstuvninger
- ✓ Reducerer effektivt smerte og hævelse ved brug
- ✓ Engangsbrug sikrer hygiejne og bekvemmelighed
- ✓ Nonwoven lag minimerer kuldefølelsen mod huden



Produktbeskrivelse

Easy Ice kuldeforpackningen er designet til effektiv lindring af smerter og hævelser. Den aktiveres ved et enkelt knæk mellem fingrene. Ideel til behandling af forstuvninger, slag og overfladiske brandsår. Kuldepakningen er beregnet til engangsbrug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kuldepakning
Varemærke	Easy Ice
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Urinstof, ammoniumchlorid og vand
Længde/dybde	18 cm
Bredde	14 cm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIA
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Kun til ekstern brug. Til engangsbrug. Produktet fungerer ikke mere, når det først er brugt. Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Undgå at ødelægge posen og få dens indhold til at lække. Indholdet laver mærker, irriterer (i tilfælde af kontakt skyldes området med vand i 15 min.) og er skadeligt (hvis det indtages skal der omgående opsøges læge). Skal opbevares ved stuetemperatur uden for børns rækkevidde og langt fra varmekilder og brandbare materialer. Må ikke kommes på beskadiget hud. Kontakt læge i tilfælde af hjerte-kar-sygdomme, kredsløbssygdomme, diabetes og/eller følelsesløshed i huden (Raynauds syndrom), brug på børn og ældre, såfremt der er tvivl om behandlingen som skal udføres, og hvis symptomerne varer ved. Brug ikke på babyer og børn under 3 år gamle. Hvis der opstår enhver form for seriøs sikkerhedsmæssig ulykke, når du anvender den medicinske enhed, bedes du venligst rapportere det til producenten og den passende autoritet i dit land.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	25 stk	38 cm	26 cm	16.5 cm	5703538081743
stk	1 stk				8033196353300



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.