

# OVERFLADEDESINFEKTION

## Actichlor™ Plus

Klorbaseret desinfektionsmiddel

Brusetablet indeholdende klor (NaDCC) i kombination med klorkompatible tensider giver tilfredsstillende rengøring og desinficerende egenskaber.

Actichlor Plus er:

- ▲ Effektiv mod alle bakterier, sporer, svampe, skimmel og virus incl Hepatitis B og HIV.
- ▲ Let at anvende - tabletter og tom flaske til brugsopløsning.



# Actichlor™ Plus

Klorbaseret desinfektionsmiddel

## Hvorfor Actichlor™ Plus?

### TILFREDSSTILLENDEN RENGØRINGS OG DESINFEKTION

Actichlor Plus kombinerer klor och rengørende klorkompatible tensider i en tablet.

## Desinfektion med Actichlor™ Plus

Før desinfektion i sædvanlig klinisk miljø (MRSA, VRE, C. Diff): opløs 1 tablet i 1 liter vand for at komme frem til en opløsning på 1000 ppm.

Ved rengøring og desinfektion af blod og spildte kropsvæsker, lav en opløsning på 10000 ppm = 10 tabletter i 1 liter vand.

### MIKROBIOLOGISKE EGENSKABER

Den desinficerende opløsning af Actichlor Plus, er effektiv mod alle bakterier, sporer, gærsvampe og virus incl Hepatitis B og HIV.

### UDDANNELSE OG RÅDGIVNING

Kontakt jeres Ecolab konsulent for undervisningsmateriale og eventuel uddannelse af personale.

## MICROBIOLOGICAL AND VIROLOGICAL TEST RESULTS

EFFICACY UNDILUTED		KONC.		KONTAKTID
		PPM	gTabs/L	
EN 13727 bakteriebekæmpende	Rene	200	1 Tab/5L	1 min
	Urene	1000	1 Tab/1L	5 min
EN 13624 gærbekæmpende	Rene	200	1 Tab/5L	1 min
	Urene	1000	1 Tab/1L	5 min
EN 13624 svampekæmpende	Rene	2000	2 Tabs/1L	15 min
	Urene	5000	5 Tabs/1L	15 min
EN 14348 mykobakteriebekæmpende	Rene	1000	1 Tab/1L	15 min
	Urene	5000	5 Tabs/1L	15 min
EN 14476 virusbekæmpende	Rene	1000	1 Tab/1L	5 min
	Urene	1000	1 Tab/1L	5 min
EN 13704 Sporebekæmpende (Clostridium difficile)	Rene	1000	1 Tab/1L	10 min
EN 13704 sporebekæmpende	Rene	5000	5 Tabs/1L	10 min

### ECOLAB A/S

Høffdingsvej 36  
2500 Valby  
+45 36 15 85 15  
www.dk.ecolab.eu

### OMSTILLINGEN

+45 36 15 85 85

### PRODUKTSPECIFIKATION OG FORHOLDSREGLER

- ▲ Opbevar Actichlor Plus på et svalt og tørt sted og gerne i et aflåst skab.
- ▲ Opløsningen er ikke klassificeret som helsefarlig, men skal opbevares uden for rækkevidde for patienter og ikke uddannet personale. Må ikke opbevares eller anvendes sammen med syreholdige produkter!
- ▲ Anvend altid handsker og forklæde ved enhver brug. ved risiko for stænk, brug beskyttelsesbriller.
- ▲ Opløsningen er holdbar i 24 timer.
- ▲ Tabletten skal opløses i koldt vand.
- ▲ Tilsæt vand først og tilsæt derefter tabletten i blandingsflasken.
- ▲ Ved opløsning i blandingsflasken, sørg for at låget er sat let på, så der kan komme lidt luft til. Blanding bør foretages i ventilerede rum.
- ▲ Anvend aldrig Actichlor Plus direkte på sure/syreholdige overflader som eksempelvis, urin, opkast og afføring etc.
- ▲ Ved større forureninger, skal vanlig rengøring foretages før brug af Actichlor plus.
- ▲ Overflader som kan komme i direkte kontakt med patienters hud og overflader som ofte desinficeres, eller overflader af rustfrit stål, Bør skylles i rent vand efter anvendelse af Actichlor plus.
- ▲ Ved spild af blod, anvend papirservietter på forureningen, fugt med Actichlor plus blandingen, lad det virke i 2 minutter. Fjern papiret, rengør og desinficer igen med Actichlor plus på et større område end selve forureningen.

PROVEN.  
EFFECTIVE.  
EFFICIENT.

### ANVENDELSESOMRÅDE

Til desinfektion af blod stænk, spildte kropsvæsker, hårde overflader i kliniske miljøer og sengeborde.

### BRUGSANVISNING

For at opnå en opløsning på 1000 ppm, opløs 1x1,7 gram tablet i 1 liter vand i blandingsflasken.

For at opnå en opløsning på 10000 ppm, opløs 10x1,7 gram tabletter i 1 liter vand i blandingsflasken.

### INDHOLD

Hver Actichlor Plus-tablet indeholder; Natriumdikloroisocyanurat (NaDCC, troclosen natrium) i en brusetablet.

### PAKKESTØRRELSE OG ORDREINFORMATION

PRODUKT	ENHED	LEV	VARENØR
Actichlor Plus 1.7g Desinficerende Tabletter	150 x 1.7g	6x150	3056870
Actichlor Blandflaska	1L	1	10018653

### OMSTILLINGEN:

**36158585**

dk-customerservice@ecolab.com

HÅNDTER ALTID BIOCIDER SIKKERT.  
LÆS ALTID ANVISNINGER FØR BRUG.  
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN



Actichlor Plus 1.7g  
Desinfektionstabletter

**ECOLAB®**